



TELEMEDHUB  
telemedhub.io



# Мониторинг артериального давления

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

**ПОСОБИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ**



## Комплектация набора



Набор для выдачи пациенту  
включает в себя:

- 1 ТелеМедХаб
- 2 Тонометр
- 3 Манжета для тонометра
- 4 Зарядное устройство к ТелеМедХабу
- 5 Адаптер питания для тонометра

# Измерение артериального давления



Перед выдачей набора пациенту во время приема выполните следующие действия:



1. Достаньте ТелеМедХаб из кейса



2. Включите ТелеМедХаб длительным нажатием кнопки справа



3. После загрузки устройства необходимо авторизовать пациента в системе. Для этого нажмите на пункт меню «Еще» и введите номер телефона пациента.



4. Пациенту на телефон придет код в смс, необходимо ввести его на ТелеМедХабе.



5. Перейдите в раздел «Анализы». Данный раздел должен быть пустой.



6. Тонометр, находящийся в кейсе, уже заранее сопряжен с данным ТелеМедХабом. При следующем измерении он автоматически передаст данные в ТелеМедХаб.



7. Выключите ТелеМедХаб длинным нажатием кнопки справа, положите его обратно в кейс. Набор готов для выдачи пациенту.



TELEMEDHUB  
telemedhub.io

Контакты:



support@telemedhub.io

