



TELEMEDHUB
telemedhub.io



Мониторинг уровня глюкозы в крови

в домашних условиях

ПОСОБИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



Комплектация набора



Набор для выдачи пациенту
включает в себя:

- 1 ТелеМедХаб
- 2 Глюкометр
- 3 Тест-полоски
- 4 Ручка для прокалывания
- 5 Зарядное устройство к ТелеМедХабу

Передача набора пациенту



Перед выдачей набора пациенту во время приема выполните следующие действия:



1. Достаньте ТелеМедХаб из кейса



2. Включите ТелеМедХаб длительным нажатием кнопки справа



3. После загрузки устройства необходимо авторизовать пациента в системе. Для этого введите номер телефона пациента.



4. Пациенту на телефон придет код в смс, необходимо ввести его на ТелеМедХабе.



5. Перейдите в раздел «Анализы». Данный раздел должен быть пустой.



6. Глюкометр, находящийся в кейсе, уже заранее сопряжен с данным ТелеМедХабом. При следующем измерении он автоматически передаст данные в ТелеМедХаб. Выключите ТелеМедХаб длинным нажатием кнопки справа, положите его обратно в кейс. Набор готов для выдачи пациенту.



TELEMEDHUB
telemedhub.io

Контакты:



support@telemedhub.io

